

DIPTER BAC

1. Destination

Ces lingettes ont été étudiées pour l'aseptie rapide des mains ainsi que pour la désinfection rapide des ustensiles sensibles à la contamination bactérienne, virale et fongicide. Ces lingettes ont été testées à l'Institut Pasteur de Lille, le liquide imprégnant les lingettes est agréé aux normes les plus strictes.

SECTEURS D'UTILISATION : Les lingettes s'utilisent dans tous les secteurs sensibles à la contamination et plus particulièrement dans les professions suivantes : médicale, paramédicale, chirurgie dentaire, vétérinaire, laboratoire, soins esthétiques, pompiers, ambulancier, police, services sanitaires et sociaux, ... Les lingettes trouvent également leurs applications dans le domaine industriel : assainissement, collecte des ordures, entretien de matériel médical, laboratoires industriels, ...

2. Propriétés

Le liquide imprégnant les lingettes est conforme aux normes : - BACTERICIDE : AFNOR NFT 72151 ; NF EN 1040- FONGICIDE : AFNOR NFT 72201 (sur Candida albicans) ; NF EN 1275- VIRUCIDE : AFNOR NFT 72180

3. Mode d'emploi

Percer l'opercule de sécurité et tirer horizontalement la première lingette au travers du trou de distribution jusqu'à la prédécoupe. Appliquer la lingettes sur les mains ou le petit matériel, bien frotter. Garder le contact environ 30 secondes pour un résultat optimal. Prendre les lingettes eu fur et à mesure des besoins. Bien refermer la boîte après usage.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : papier non-tissé imprégné
Couleur : Blanc
Parfum : Mentholée
Densité à 20°C : 0.980 +/- 0.02 g/cm³
PH du produit pur : A 20° C : 7 +/- 0.5

5. Stockage et étiquetage

Ne se substitue pas aux méthodes classiques de désinfection. Usage externe exclusivement. Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

Tenir hors de portée des enfants.

RECOMMANDATIONS : Stocker à l'abri du gel.